

Voice4Health – Manuale di utilizzo rapido

Voicewise Srl - Via Arno, 88 - 00198 ROMA

Tel. +39 06.87931560 - Fax +39 06.87931561

Partita I.V.A. 15322451004

Cap.soc. € 10.000,00 i.v.

www.voicewise.it

info@voicewise.it


Sommario della presentazione

- Flusso registrazione applicazione
- Flusso login applicazione
- Flusso creazione nuova analisi
- Flusso acquisizione paziente
- Altri flussi di funzionamento




Flusso registrazione applicazione

Flusso registrazione applicazione

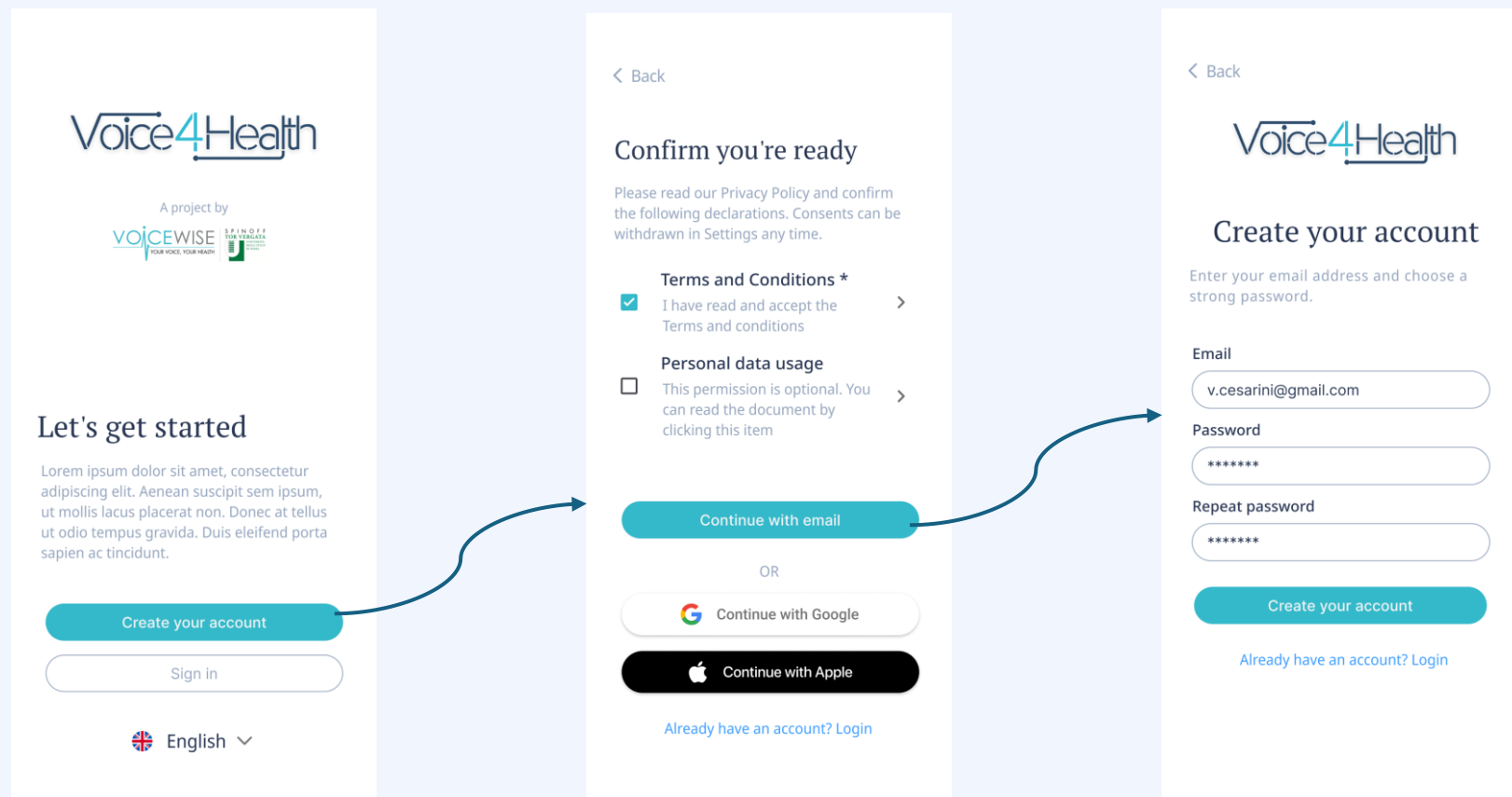

All'avvio dell'applicazione, l'utente può scegliere se creare un nuovo account oppure accedere con un account già esistente. Nell'esempio riportato, l'utente opta per la creazione di un account utilizzando email e password. La schermata intermedia permette l'accettazione dei documenti legali. Il flusso di registrazione è un flusso condiviso tra i tre 'attori' dell'app.


Flusso registrazione – Setup account

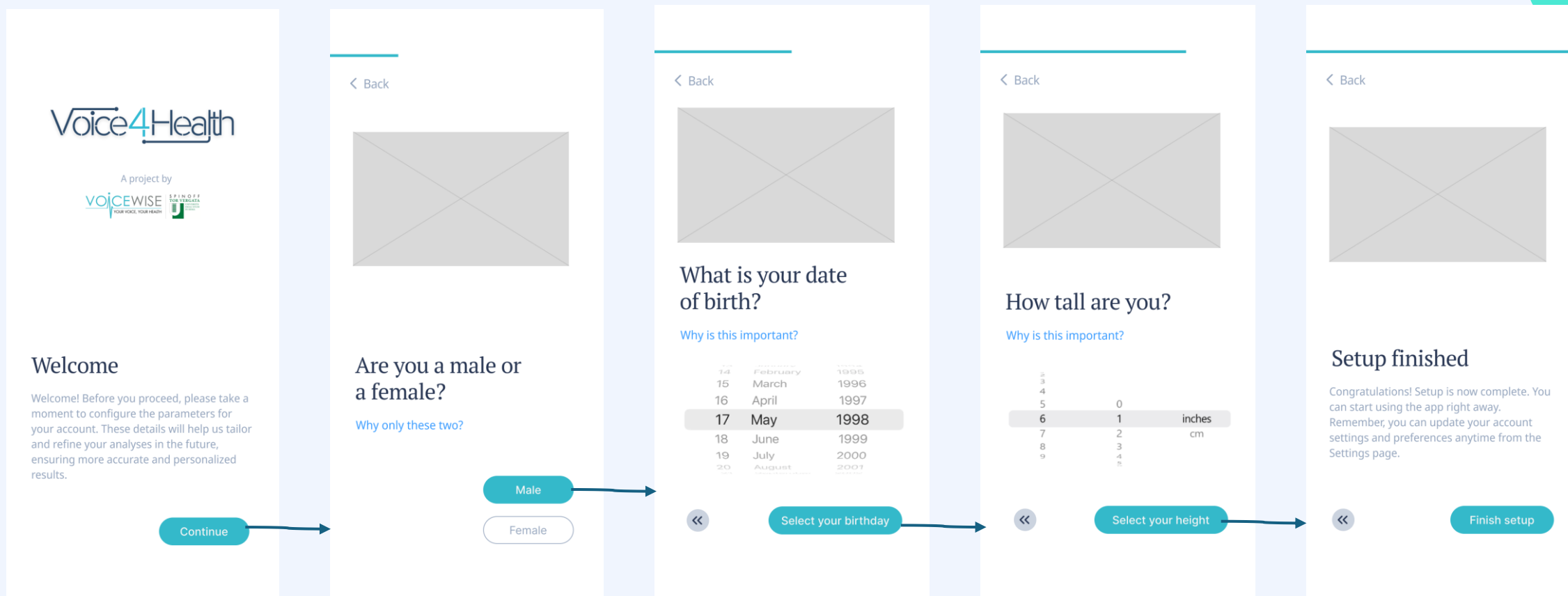

Indipendentemente dalla modalità di registrazione scelta (tramite social o email e password), l'utente viene guidato nella configurazione iniziale del proprio account. In questa fase, è possibile inserire i dati necessari per le analisi che verranno effettuate all'interno dell'app. Una barra di progresso, posizionata nella parte superiore dello schermo, indica lo stato di avanzamento del processo di configurazione.

Flusso login applicazione

Flusso login applicazione





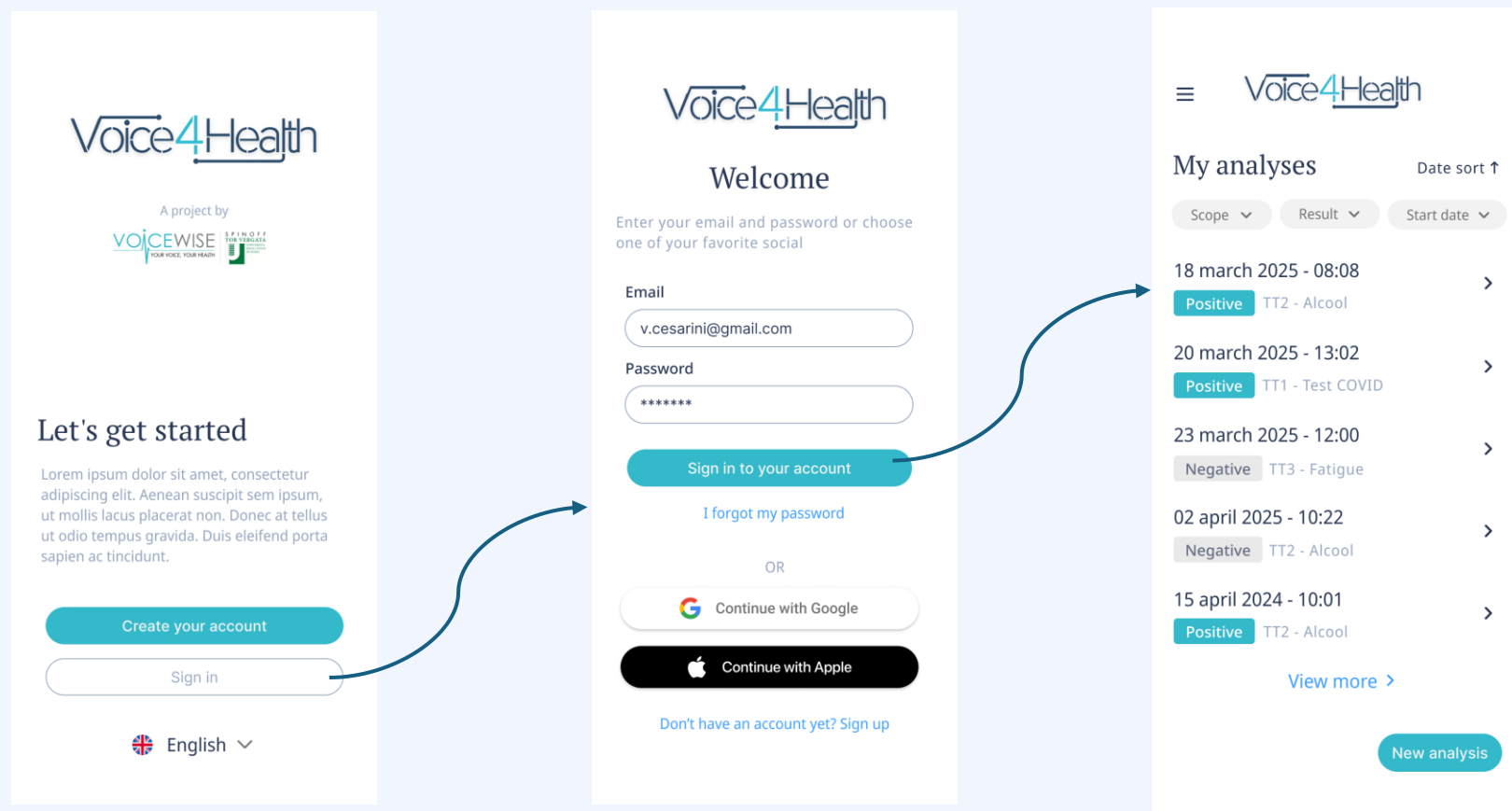


Il flusso di login standard consente all'utente di scegliere tra l'accesso tramite email e password oppure tramite social login. Una volta effettuato con successo l'accesso, l'utente viene reindirizzato alla schermata principale. Nel caso di un paziente questa schermata consente di visualizzare le analisi disponibili, crearne di nuove e interagire con le funzionalità dell'app. Il flusso di login è un flusso condiviso tra i tre 'attori' dell'app.




Flusso creazione nuova analisi

Il flusso di creazione dell'analisi è condiviso tra i tre profili utente: il medico può eseguire un'analisi ad un paziente, il paziente può svolgere autonomamente la propria analisi, mentre l'analista ha la possibilità di effettuare analisi da caricare successivamente nel sistema.

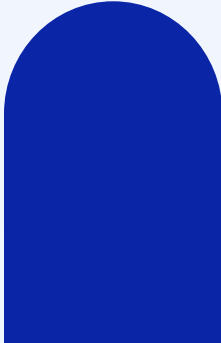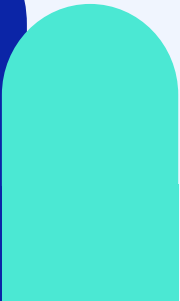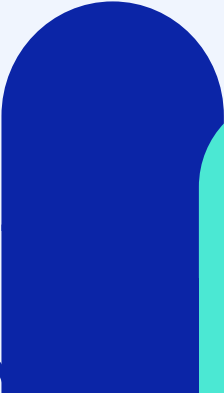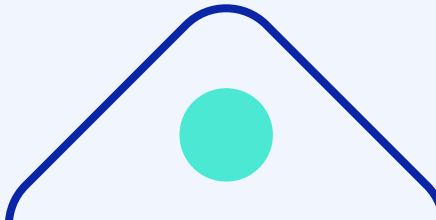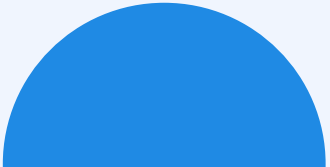


Flusso creazione nuova analisi

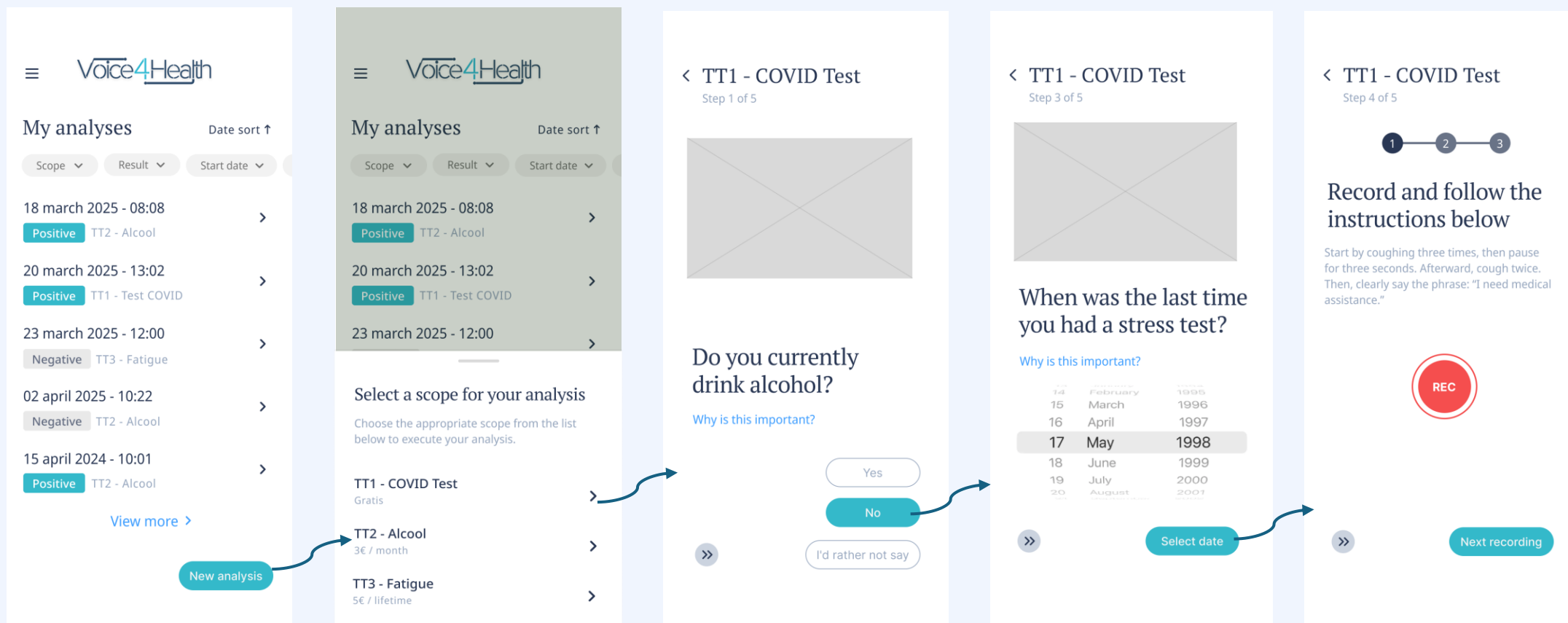


Il processo di analisi è suddiviso in più step per facilitare la compilazione da parte dell'utente, riducendo il rischio che la lunghezza del questionario lo renda oneroso o poco accurato. Anche in questo caso è presente uno stepper che indica chiaramente all'utente la fase corrente del processo. Il flusso di creazione dell'analisi prosegue nelle prossime pagine.

Flusso creazione nuova analisi – Record audio

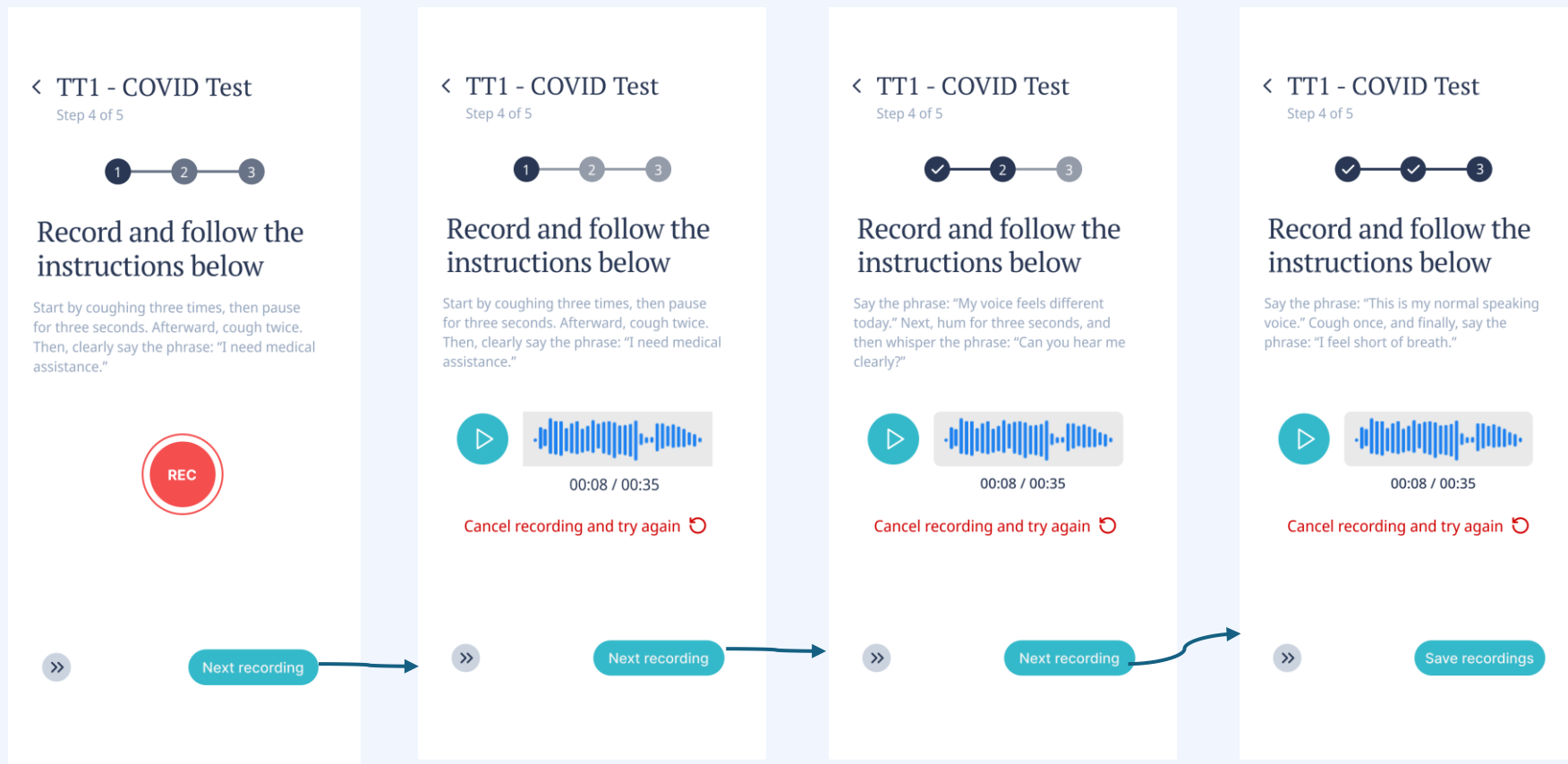

Anche la registrazione degli audio è suddivisa in più step, ciascuno rappresentato all'interno di uno stepper dedicato. Il numero di passaggi previsti dipende dalla configurazione stabilita dall'amministratore per quella specifica analisi.



Flusso creazione nuova analisi – Conclusione

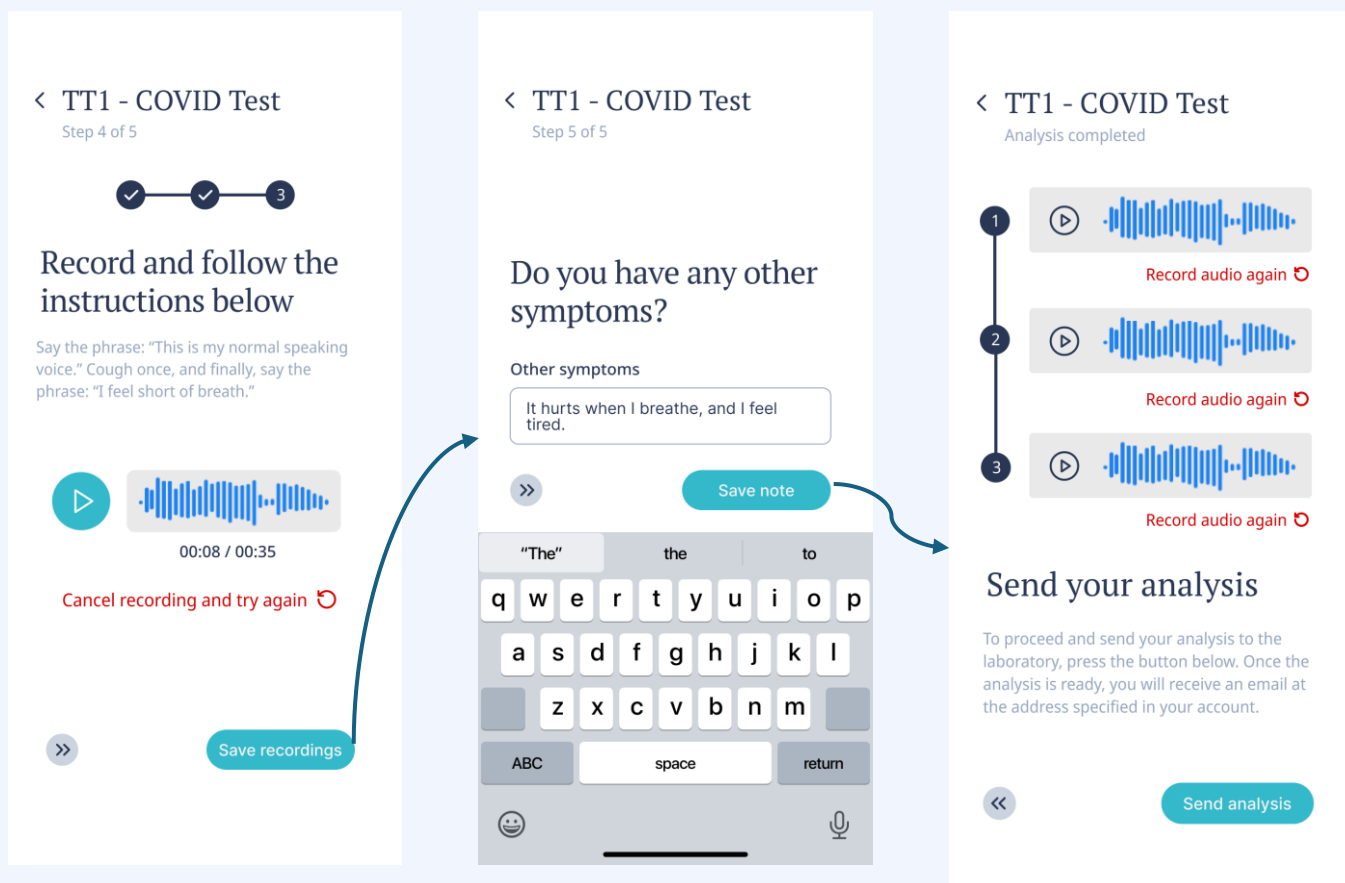

La fase conclusiva dell'analisi consente all'utente di aggiungere una nota destinata al medico, utile per supportare l'interpretazione dell'analisi generata dal sistema. Nell'ultimo step, l'utente ha inoltre la possibilità di riascoltare gli audio registrati e, se necessario, ripetere la registrazione. Al termine, con la pressione del pulsante di conferma, l'analisi completa viene inviata al sistema e l'utente viene reindirizzato alla schermata principale.

Flusso acquisizione paziente

Flusso acquisizione paziente

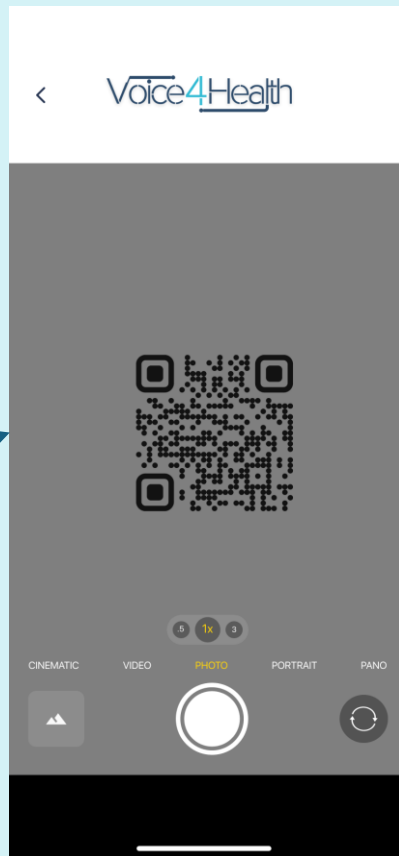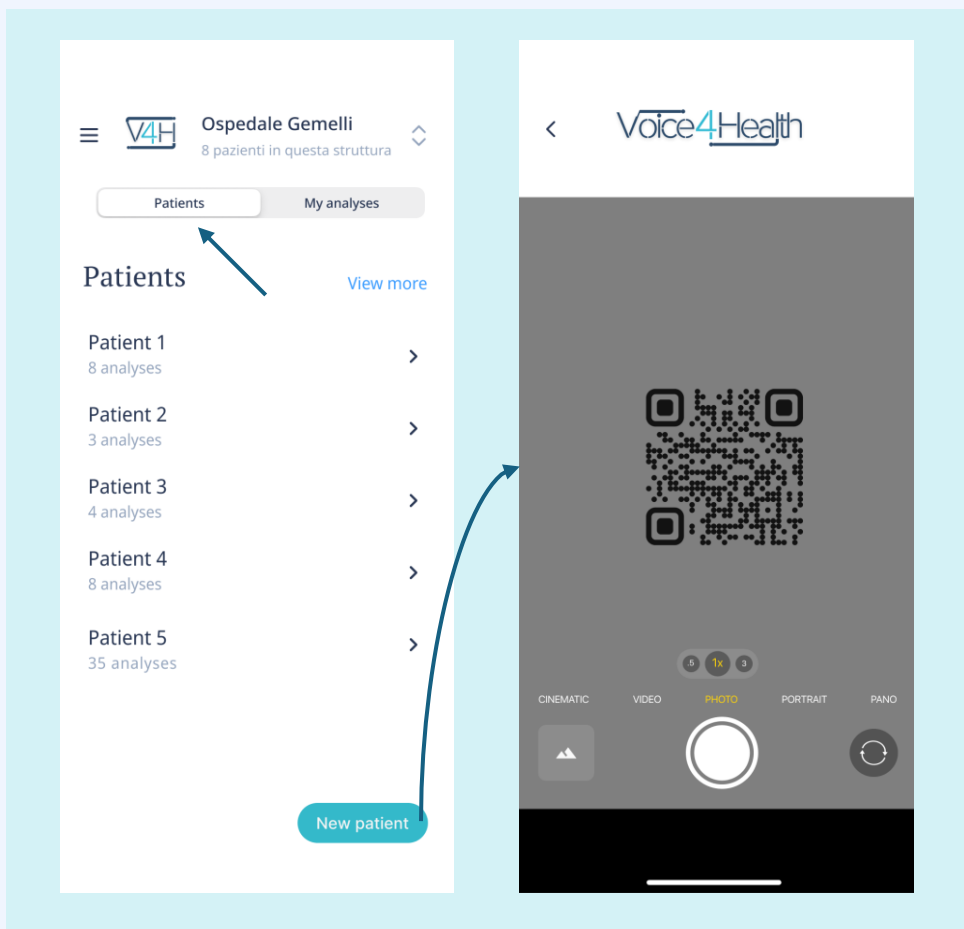

Nella schermata principale, il medico visualizza una tab che consente di scegliere se consultare l'elenco dei pazienti o le analisi effettuate. Selezionando “Patients” e successivamente “New Patient”, si apre una schermata con la fotocamera attiva, che permette di inquadrare il QR code univoco del paziente (come mostrato nelle schermate) per aggiungerlo al proprio elenco dei pazienti.

Altri flussi di funzionamento

Altri flussi – Informazioni analisi

The screenshot displays the Voice4Health app interface. On the left, a list titled 'My analyses' shows several entries with dates, times, and results. A blue arrow points from the entry '20 march 2025 - 13:02 Positive TT1 - Test COVID' to the detailed view on the right. The detailed view, titled '< TT1 - COVID Test', shows the date '08 april 2025' and a 'Positive' result. It includes a summary of the test result, a question about alcohol consumption, average daily steps, the last time stress test, and a section for recordings and other symptoms. At the bottom, there is a line chart titled 'Analysis image charts' showing COVID-19 cases per 100,000 persons for different age groups.

My analyses Date sort ↑

Scope ▾ Result ▾ Start date ▾

18 march 2025 - 08:08
Positive TT2 - Alcool

20 march 2025 - 13:02
Positive TT1 - Test COVID

23 march 2025 - 12:00
Negative TT3 - Fatigue

02 april 2025 - 10:22
Negative TT2 - Alcool

15 april 2024 - 10:01
Positive TT2 - Alcool

[View more >](#)

[New analysis](#)

< TT1 - COVID Test
08 april 2025

Positive

The test result shows that the patient who took it is positive.

Do you currently drink alcohol?
Answer is: Yes

Average daily steps
Answer is: Less than 10k

Last time stress test
17 may 1998

Recordings
[Listen to test recordings](#)

Other symptoms
It hurts when I breathe, and I feel tired.

Analysis image charts


COVID-19 cases per 100,000 persons

Legend:

- 0-13 yrs
- 14-17 yrs
- 18-24 yrs
- 25-44 yrs
- 45-79 yrs
- ≥80 yrs

Cliccando su un'analisi all'interno dell'elenco, si accede alla schermata di dettaglio, che mostra un riepilogo delle risposte, l'eventuale grafico generato dal sistema e l'esito dell'analisi. Questo flusso è condiviso sia dagli utenti sia dai medici, mentre non è accessibile agli analisti, che possono esclusivamente effettuare analisi. Gli elementi visualizzati nella schermata di dettaglio sono dinamici e configurabili dall'amministratore.

Altri flussi – Cambio struttura ospedaliera

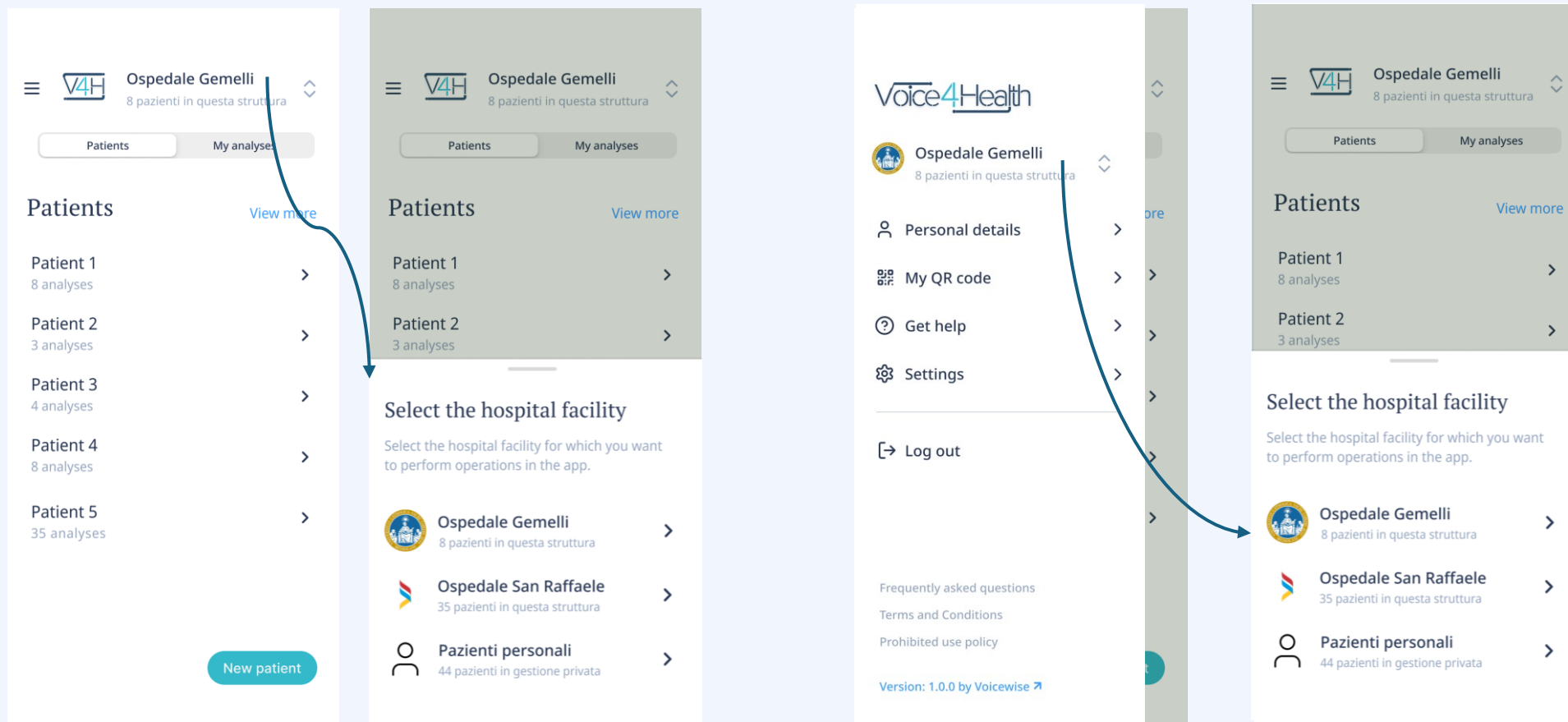

Dalla schermata principale, il medico può cambiare struttura ospedaliera in modo semplice attraverso due modalità: facendo tap sul nome della struttura corrente presente nell'header, oppure accedendo alla stessa opzione tramite il menu. Il tap apre un pannello a comparsa dal basso, che consente di visualizzare l'elenco delle strutture disponibili e selezionare quella desiderata. Una volta effettuata la selezione, verranno mostrati i pazienti e le analisi associate alla struttura scelta.

Fine

VOICewise
YOUR VOICE, YOUR HEALTH

SPIN OFF
TOR VERGATA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ROMA